



Niezbędnik higienistki stomatologicznej
został stworzony z myślą
o nas - higienistkach.

Stawiam na pierwszym miejscu dobro
moje i pacjenta, co przekłada się na pracę
ergonomiczną. Ideą Niezbędnika jest
zebranie naszych ulubionych narzędzi
w jeden zestaw.

*Katarzyna
Kurhan*



[instagram.com/ciotkahigienistka](https://www.instagram.com/ciotkahigienistka)



PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA

NEVA DENT
nevadent.pl

Zestaw
do profilaktyki
CiotkiHigienistki

Ciotkahigienistka 

Ciotkahigienistka 
by hig. Katarzyna Kurhan

Zestaw do profilaktyki CiotkiHigienistki

by hig. Katarzyna Kurhan

Opis zestawu

K1 Gumka BUN

Przeznaczona do początkowego polerowania. Jej smukły kształt pozwala na dotarcie w miejsca ciężko widoczne, między innymi zrotowane zęby.

Zalecana prędkość pracy: max. 12 tys. RPM + chłodzenie wodne.

K2 Gumka Shofu OneGloss

To jednostopniowa gumka do wykańczania i polerowania. Zapewnia idealne polerowanie uzupełnień kompozytowych przez zmianę docisku podczas przejścia z wykańczania do polerowania. Kształt „talerzyka” pozwala dopolerować zaokrąglenia listw brzeżnych powierzchni mezialnych i dystalnych zęba.

Zalecana prędkość pracy: max. 12 tys. RPM + chłodzenie wodne.

K3 Tarczka Optidisc Fine

Polerowanie, usuwanie nierówności i wygładzanie powierzchni wypełnienia. Pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy wykonywanego przez Ciebie etapu polerki. Poleruje zaokrąglenia proksymalne, brzegi sieczne, listwy brzeżne.

Zalecana prędkość pracy: max. 12 tys. RPM + chłodzenie wodne.

K4 Gumka do polerowania (słoneczko) BUSCH

Kolejny etap polishingu. Licowe powierzchnie zęba, listwy brzeżne, powierzchnie żujące.

Zalecana prędkość pracy: max. 10 tys. + chłodzenie wodne.

K5 Gumka Kenda

1. Polishing na sucho wypełnień kompozytowych.
Zalecana prędkość pracy: max. 4 tys. RPM, w połączeniu z K7.

2. Polerowanie na mokro.
Zalecana prędkość pracy: 7500 - 10 000 RPM + chłodzenie wodne.

Dobrze się sprawdza także do polerowania listw brzeżnych zrotowanych siekaczy.

K6 Szczoteczka nylonowa stożek Extra Soft

Przeznaczona do trudno dostępnych powierzchni zębów. Dobrze się sprawdza doczyszczając powierzchnie za ostatnimi trzonowcami, w brakach skrzydłowych. Idealne połączenie z delikatną pastą polerską do finishing'u.

Zalecana prędkość pracy: 12 tys. RPM + chłodzenie wodne.

K7 Szczoteczka nylonowa Extra Soft

W połączeniu z K5 polerowanie na sucho kompozytu. Polerowanie powierzchni zębów, idealne połączenie z pastą polerską do finishing'u.

Zalecenie prędkości pracy: max. 12 tys. RPM + chłodzenie wodne.

K8 Końcówka do skalera P3

Usuwanie kamienia z powierzchni naddziąstłowych.

K9 Końcówka do skalera G1

Usuwanie kamienia z powierzchni poddziąstłowych, w tym także głębokich złogów.

