



INSTRUKCJA QUICKWHITE HOME PLUS

DOTYCZY PRODUKTÓW ZE STĘŻENIEM 6% NADTLENKU WODORU (HP) ORAZ 16% NADTLENKU KARBAMIDU

1. Po wykonaniu szyny dentysta musi wykonać pierwszą aplikację w gabinecie, wyjaśniając pacjentowi sposób użycia produktu wybielającego.
2. Pacjent w domu, każdego wieczoru przed pójściem spać, powinien umyć i nitkować zęby przed użyciem żelu wybielającego.
3. Zdjąć białą nasadkę ze strzykawki i włożyć jedną z dołączonych końcówek (końcówki są wielokrotnego użytku i należy je zachować na następny dzień).
4. Wylać produkt na przedsiolkową stronę szyny (tę, która będzie miała kontakt z wybielaną powierzchnią zęba). Powtórzyć to samo z drugą szyną dla drugiego łuku.
5. Nakładać szyny bez nadmiernego gryzienia. Unikać połykania produktu.
6. Nie jeść ani nie pić podczas procesu / Trzymać w ustach przez 30-40 minut (stężenie 6% HP lub CP 16%), a następnie przepłukać dużą ilością wody.
8. Powtarzać codziennie przez 3 do 4 tygodni, używając co tydzień strzykawki o pojemności 3 ml.

ZALECENIA DOTYCZĄCE SPOŻYTEJ ŻYWNOŚCI W CIĄGU 72 GODZIN PO WYBIELANIU:

Tytoń, Kawa, Herbata, Cola, Czerwone wino, Różowe wino, Musztarda, Karczoch, Burak, Wiśnie, Truskawki, Jeżyny, Maliny, Granaty, Arbuzy, Czarne winogrona, Czekolada, Kakao, Marchew, Brokuły, szpinak, smażony pomidor, atrament z kałamarnicy, gulasze z barwnikiem lub szafranem (np. paella, gulasze).

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

1. QuickWhite™, stosowany prawidłowo, wybieli większość protez zębowych z niezwykłym rezultatem. Należy jednak unikać tworzenia fałszywych oczekiwań lub gwarancji dla pacjenta co do wyniku. Zwłaszcza w przypadku tetracyklin wyniki pojawią się po 2 lub więcej sesjach.
2. Chociaż nie ma dowodów na uszkodzenie zęba, ważne jest, aby pacjent został poinformowany w pierwszej kolejności o możliwym dyskomforcie, jakiego może doświadczyć, takim jak nadwrażliwość. Taki dyskomfort zniknie po około 2 dniach.
3. Na tydzień przed leczeniem należy przeprowadzić czyszczenie zębów.
4. Leczenie próchnicy, a także innych chorób, należy przeprowadzić przed wybielaniem. Zabiegi te, jeśli są na widocznych zębach, powinny być wykonane tymczasowo, ponieważ ostateczne wypełnienie zostanie wykonane 20 dni po wybielaniu z uzyskanym odcieniem.

INSTRUKCJA QUICKWHITE HOME PLUS



5. Ochrona dziąseł jest niezbędna, aby uniknąć podrażnienia podczas leczenia, dlatego konieczne jest pokrycie odsłoniętych szyjek 1 mm grubości na brzegu dziąsła, a także pokrycie startych brzegów siecznych i diastem.
6. Nadtlenek wodoru należy przechowywać w lodówce i wyjąć z zimna na 50 minut przed zabiegiem.
7. Jeśli żel wejdzie w kontakt z tkanką miękką, należy natychmiast spłukać dużą ilością wody i nałożyć witaminę E na dotknięty obszar.