

INSTRUKCJA QUICKWHITE IMPACT KIT

1. Wyjąć butelkę nadtlenu wodoru z lodówki na godzinę przed rozpoczęciem procedury wybielania.



2. Dopasować wstępnie wybielony kolor zębów pacjenta do kolornika VITA ShadeGuide ułożonego według wartości (B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4, C4).

3. Zrób zdjęcie wstępnie wybielonego odcienia zębów.

4. Umieść retraktor policzkowy w ustach pacjenta i dokładnie wypoleruj zęby za pomocą kapsułki dołączonej do zestawu, aby wyeliminować przebarwienia powierzchniowe i usunąć warstwę płytki nazębnej. Nie używaj żeli troficznych ani żadnych substancji zawierających fluor lub glicerynę.



5. Wysuszyć zęby i dziąsła, a następnie nałożyć żywicę ochronną na dziąsła. Dobrze pokryć całą tkankę miękką, nie zaczynać od pierwszego zęba, na który nałożono żel. Naświetlić lampą każdy wybielany ząb.

Kontynuować aktywację światłem wokół obu łuków zębowych przez łącznie trzy przejścia.

6. Odessać żel z zębów i wytrzeć pozostałości żelu.



Przeptukać powierzchnię zębów między aplikacjami, aby zminimalizować wrażliwość.

Ponownie nałóż żel wybielający i ponownie użyj lampy.

7. Po zakończeniu drugiego cyklu odessać żel z zębów i w razie potrzeby spłukać. Jeśli nie uzyskano oczekiwanych rezultatów, można powtórzyć trzeci cykl.

Można wykonać trzy cykle po 10 minut.



8. Wypłucz i usuń lakier z dziąseł.

9. Po zakończeniu procedury wybielania należy dokładnie wypolerować zęby.

Uwaga: Nadmierna ekspozycja żywicy przez lampę może spowodować nagrzewanie się dziąseł.



10. Wymieszać nadtlenek wodoru z proszkami fotoaktywującymi, aż do uzyskania gładkiej pasty o konsystencji żelu, wygodnej do pracy. Nałożyć produkt na ząb od strony przedsiionkowej warstwą o grubości około 2 mm. Po nałożeniu żelu zamknąć słoiczek, aby zminimalizować aktywację produktu między ekspozycjami.

11. W przypadku korzystania z systemu LumaCool umieść głowicę lampy w odległości 2 cm od ust.

Ustaw czas i pozwól produktowi aktywować się przez 8-10 minut cyklu. W przypadku nieużywania nałożyć pastę LUMINESCENCE Diamond Paste.



12. Sprawdź nowy odcień zęba i zrób nowe zdjęcie, aby porównać go z początkowym odcieniem.

13. Przekazać pacjentowi strzykawkę (strzykawkę) i alignery do pielęgnacji domowej.



INSTRUKCJE LECZENIA DOMOWEGO

1. W domu pacjent powinien umyć i wynitkować zęby przed użyciem.

2. Zdjąć białą nasadkę ze strzykawki i włożyć jedną z dołączonych końcówek (końcówki są wielokrotnego użytku i należy je zachować na następny dzień).

3. Wylej produkt na przedsiionkową stronę szyny (tę, która będzie stykać się z wybielaną powierzchnią zęba). Powtórz to samo z drugą szyną dla drugiego łuku.

4. Nakładać szyny bez nadmiernego gryzienia. Unikać połykania produktu.

5. Nie jeść ani nie pić podczas procesu.

6. Po 30-40 minutach z założonymi szynami zdjąć je i spłukać dużą ilością wody.

7. Ponownie wyszczotkować, aby usunąć ewentualne pozostałości.

8. Powtarzać proces codziennie aż do zużycia produktu. Stosować tuż przed pójściem spać.

QUICKWHITE RECALL KIT INSTRUKCJA

Do stosowania w przypadku corocznego przeglądu w celu przywrócenia tonu, jako utrwalenie i wzmocnienie pełnego leczenia w klinice, w przypadku bardzo niewielkich przebarwień lub jeśli pacjent spożywał pokarmy, które nie są zalecane po leczeniu. Przeprowadzić wybielanie w klinice przy użyciu systemu LumaCool zgodnie z instrukcjami podanymi powyżej, ale wykonując tylko 10-minutowy cykl ekspozycji. Zestaw nie zawiera strzykawkę do stosowania w domu.



INSTRUKCJA QUICKWHITE IMPACT KIT

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

1. QuickWhite™, stosowany prawidłowo, wybieli większość protez zębowych z niezwykłym rezultatem. Należy jednak unikać tworzenia fałszywych oczekiwań lub gwarancji dla pacjenta co do wyniku. Zwłaszcza w przypadku tetracyklin wyniki pojawią się po 2 lub więcej sesjach.
2. Chociaż nie ma dowodów na uszkodzenie zęba, ważne jest, aby pacjent został poinformowany w pierwszej kolejności o możliwym dyskomforcie, jakiego może doświadczyć, takim jak nadwrażliwość. Taki dyskomfort zniknie po około 2 dniach.
3. Na tydzień przed leczeniem należy przeprowadzić czyszczenie zębów.
4. Leczenie próchnicy, a także innych chorób, należy przeprowadzić przed wybielaniem. Zabiegi te, jeśli są na widocznych zębach, powinny być wykonane tymczasowo, ponieważ ostateczne wypełnienie zostanie wykonane 20 dni po wybielaniu z uzyskanym odcieniem.
5. Ochrona dziąseł jest niezbędna, aby uniknąć podrażnienia podczas leczenia, dlatego konieczne jest pokrycie odstłoniętych szyjek 1 mm grubości na brzegu dziąsła, a także pokrycie startych brzegów siecznych i diastem.
6. Nadtlenek wodoru należy przechowywać w lodówce i wyjąć z zimna na 50 minut przed zabiegiem.
7. Jeśli żel wejdzie w kontakt z tkanką miękką, należy natychmiast spłukać dużą ilością wody i nałożyć witaminę E na dotknięty obszar.

ZALECENIA DOTYCZĄCE SPOŻYTEJ ŻYWNOŚCI W CIĄGU 72 GODZIN PO WYBIELANIU:

Tytoń, Kawa, Herbata, Cola, Czerwone wino, Różowe wino, Musztarda, Karczoch, Burak, Wiśnie, Truskawki, Jeżyny, Maliny, Granaty, Arbuz, Czarne winogrona, Czekolada, Kakao, Marchew, Brokuły, szpinak, smażony pomidor, atrament z kałamarnicy, gulasze z barwnikiem lub szafranem (np. paella, gulasze).