





Zestawy MAP

Zestawy MAP (system MAP) są używane w środowiskach szpitalnych, klinikach lub gabinetach dentystycznych przez wykwalifikowany personel medyczny. System MAP przeznaczony jest do ręcznego nakładania materiału do napraw endodontycznych PD MTA White.

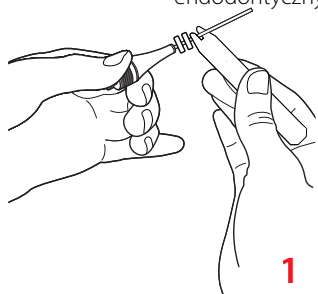


1

Za pomocą klucza umieść jeden lub więcej silikonowych stoperów na czubku odpowiedniej igły.

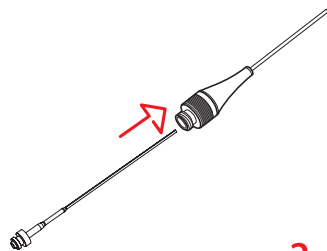


2

Włóż plastikowy tłok do odpowiedniej igły.

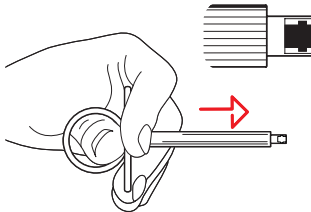


3

Wciśnij tłok strzykawki MAP tak, aby pojawiła się końcówka zamka.

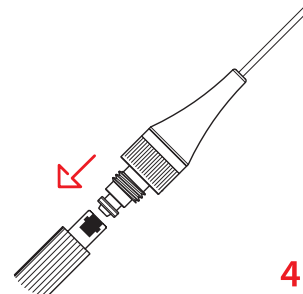


4

Włóż tłoczek do zamka i zwolnij tłok strzykawki.

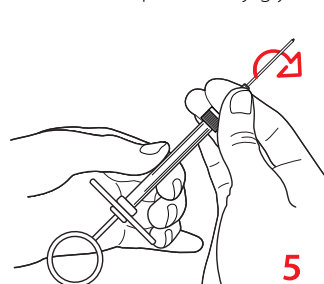


5

Wkręć igłę do strzykawki. Jeśli używasz igły NiTi należy ręcznie dostosować kształt igły do wymaganej krzywizny.

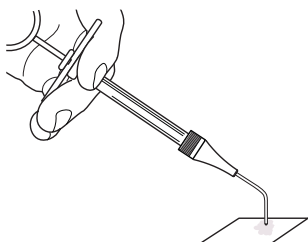


6

Przygotuj materiał naprawczy na szklanej podstawie. Wbij końcówkę igły w materiał naprawczy kilka razy aby ją napelnić.

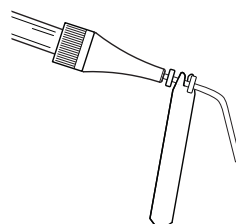


7

Usuń nadmiar materiału, wysuwając jeden silikonowy ogranicznik poza koniec igły.

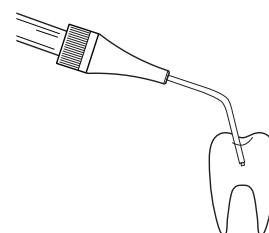


8

Naciśnij tłok strzykawki, aby zaaplikować materiał. W razie potrzeby ponownie napełnij instrument.

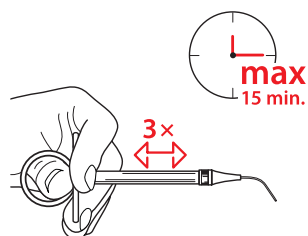


9

W ciągu 15 minut po zakończeniu zabiegu wciśnij tłok strzykawki 3 razy aby usunąć nadmiar materiału.

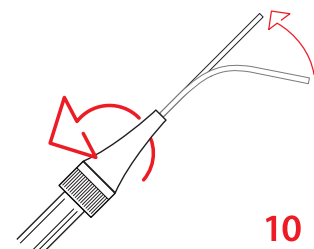


10

Jeżeli używasz igły NiTi należy ręcznie wyprostować igłę. Odkręć głowicę.

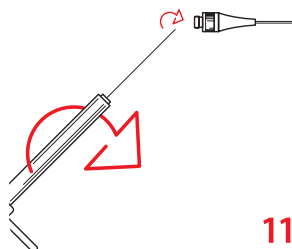


11

Naciśnij tłok strzykawki i wyjmij tłok z zamka.

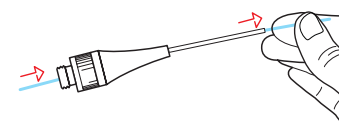


12

Oczyść wnętrze głowki sztywnej nicią dentystyczną typu EMOFORM TrioFloss lub ProxySoft 3 in 1 Floss. Więcej szczegółów można znaleźć w kroku nr 1 protokołu ponownego przetwarzania.

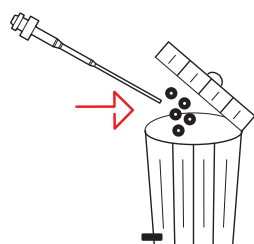

13

Usuń i wyrzuć wszelkie zużyte lub pozostałe silikonowe ograniczniki.

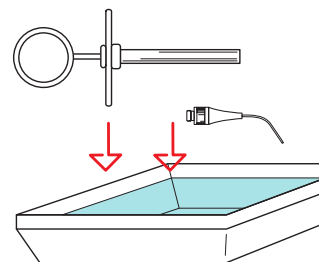

14

Natychmiast wyczyść wszystkie pozostałe części, aby usunąć pozostałości materiału.

Uwaga: plastikowe tłoczki należy wyrzucić po 1 użyciu i wymienić

UWAGA!

Przed użyciem jednorazowy plastikowy tłok należy oczyścić i zdezynfekować. Sterylizacja ponownie używanych narzędzi jest niezbędna przed użyciem.

PO UŻYCIU:

Wyczyść wnętrze głowicy w ciągu 15 minut od zabiegu za pomocą sztywnej nici dentystycznej z gwintem, takiej jak EMOFORM TrioFloss lub ProxySoft 3 in 1 Floss. Jeśli nie zostanie to zrobione, odblokowanie i wyczyszczenie urządzenia może być bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.