



INSTRUKCJA QUICKWHITE HOME PLUS

DOTYCZY PRODUKTÓW ZE STĘŻENIEM 12% NADTLENKU WODORU (HP)

1. Stomatolog po wykonaniu szyny w stężeniu 12% nadtlenu wodoru powinien przystąpić do przeprowadzenia całego zabiegu w gabinecie stomatologicznym.
2. Pacjent powinien być poddawany 20-30 minutowym sesjom w klinice przez 7 do 10 kolejnych dni.
3. Po przeprowadzeniu higienizacji jamy ustnej i rejestracji koloru, zabieg przeprowadza się poprzez nałożenie żelu wybielającego na obszar przedsiódkowy w szynie.
4. Po upływie 20-30 minut należy spłukać i powtarzać aplikacje codziennie, zawsze wykonując wstępne polerowanie.
5. Po zakończeniu wszystkich dni leczenia należy zapisać kolor, poinformować pacjenta o szkodliwych pokarmach i przeprowadzić kontrolę koloru w ciągu następujących 6 miesięcy lub co najmniej raz w roku.
6. Nie jeść ani nie pić podczas procesu.
7. Po 20-30 minutach z założonymi szynami zdjąć je i spłukać dużą ilością wody. Powtarzać codziennie przez 3 do 4 tygodni, używając co tydzień strzykawki o pojemności 3 ml.

ZALECENIA DOTYCZĄCE SPOŻYTEJ ŻYWNOŚCI W CIĄGU 72 GODZIN PO WYBIELANIU:

Tytoń, Kawa, Herbata, Cola, Czerwone wino, Różowe wino, Musztarda, Karczoch, Burak, Wiśnie, Truskawki, Jeżyny, Maliny, Granaty, Arbuz, Czarne winogrona, Czekolada, Kakao, Marchew, Brokuły, szpinak, smażony pomidor, atrament z kałamarnicy, gulasze z barwnikiem lub szafranem (np. paella, gulasze).

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

1. QuickWhite™, stosowany prawidłowo, wybieli większość protez zębowych z niezwykłym rezultatem. Należy jednak unikać tworzenia fałszywych oczekiwań lub gwarancji dla pacjenta co do wyniku. Zwłaszcza w przypadku tetracyklin wyniki pojawią się po 2 lub więcej sesjach.
2. Chociaż nie ma dowodów na uszkodzenie zęba, ważne jest, aby pacjent został poinformowany w pierwszej kolejności o możliwym dyskomforcie, jakiego może doświadczyć, takim jak nadwrażliwość. Taki dyskomfort zniknie po około 2 dniach.
3. Na tydzień przed leczeniem należy przeprowadzić czyszczenie zębów.
4. Leczenie próchnicy, a także innych chorób, należy przeprowadzić przed wybielaniem. Zabiegi te, jeśli są na widocznych zębach, powinny być wykonane tymczasowo, ponieważ ostateczne wypełnienie zostanie wykonane 20 dni po wybielaniu z uzyskanym odcieniem.

INSTRUKCJA QUICKWHITE HOME PLUS



5. Ochrona dziąseł jest niezbędna, aby uniknąć podrażnienia podczas leczenia, dlatego konieczne jest pokrycie odsłoniętych szyjek 1 mm grubości na brzegu dziąsła, a także pokrycie startych brzegów siecznych i diastem.
6. Nadtlenek wodoru należy przechowywać w lodówce i wyjąć z zimna na 50 minut przed zabiegiem.
7. Jeśli żel wejdzie w kontakt z tkanką miękką, należy natychmiast spłukać dużą ilością wody i nałożyć witaminę E na dotknięty obszar.