


iVoc™ Skrócona instrukcja obsługi – instalacja i konfiguracja

Instalacja krok po kroku


1. Pierścienie

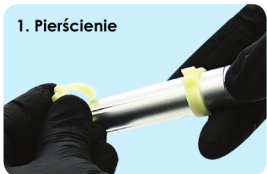

2. Krótki wężyk



3. Końcówka piezo

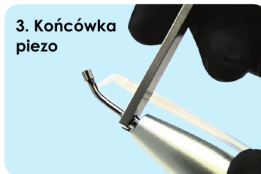


4. Końcówka iVac



5. Złączka kolankowa



6. Długi wężyk ze złączem męskim

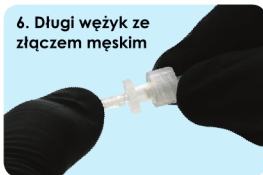


7. Długi wężyk ze złączem żeńskim




8. Końcówka kątowa



Równoczesna irygacja ze zbiornika lub butelek

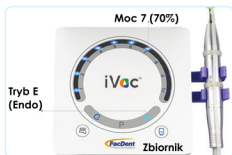

1. Moc 70%, tryb E, podłączony zbiornik

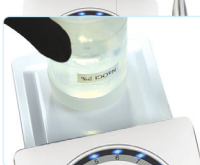


2. Butelka



3. Dostosowanie ilości płynu

Równoczesna irygacja strzykawką i kaniulą

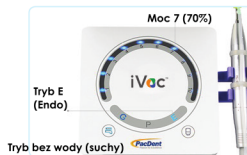

1. Moc 70%, tryb E, bez wody



2. Strzykawka i kaniula .60




- Naciśnij dwukrotnie aby aktywować 30 sek. tryb pracy
 - Podawanie płynu bezpośrednio komory
 - Aktywuj końcówkę iVac dopiero w kanale
 - Wypłucz wodą destylowaną po użyciu (tryb płukania)
- Sprawdź dokładnie instrukcję w razie wątpliwości



Zeskanuj kod
aby dowiedzieć
się więcej

Równoczesna irygacja ze zbiornika lub butelek

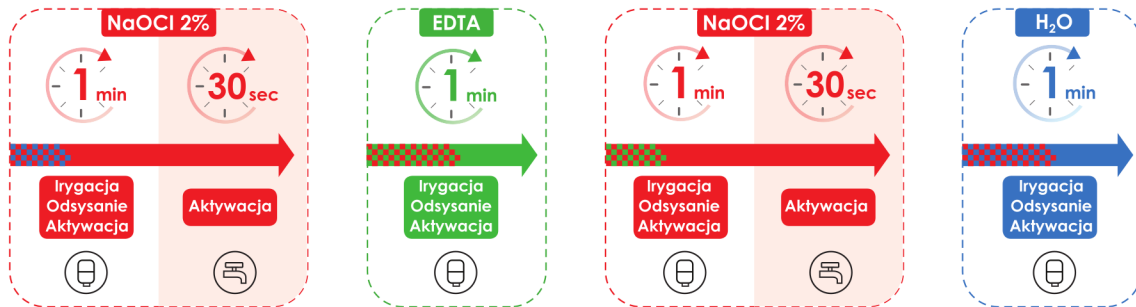

Równoczesna irygacja strzykawką i kaniulą

