

SKRÓCONA INSTRUKCJA DO MANEKINA Z POPIERSIEM



MANEKIN HST/HKE U3 z popiersiem	
Lista akcesoriów:	Model szczęki z łukiem górnym i dolnym, wraz z kompletem zębów, z dziąsłem, z twardej gumy.
	Głowa, umocowana na metalowych zawiasach kulowych, umożliwiającą jej rotacje do dowolnej pozycji, wraz z uchwytem (rączką) blokującym położenie.
	Silikonowa osłona twarzowa na szczękę, imitująca skórę ludzką, z zaworem odprowadzającym płyny z dolnej części szczęki (umożliwia podłączenie odsysania płynów)
	Opaski mocujące (3 sztuki) pozwalające dopiąć manekina do fotela dentystycznego.
	Otwierana pokrywa czaszkowa, wykonana z tworzywa. Sztuczne uszy, przykręcane.

<p>Instrukcja instalacji:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Za pomocą dołączonych taśm mocujących, przymocować fantoma do fotela (pasy powinny być ułożone poziomo jak i pionowo względem manekina i unitu). Zaciśnąć oraz nałożyć rzepy na siebie. 2. Włożyć (o ile nie zostały zamontowane wcześniej) łuki zębowe do szczęki. Należy wpasować łuk, do otworów wejściowych i delikatnie docisnąć. Nie ma potrzeby przykręcenia – łuk przyczepia się do szczęki za pomocą wbudowanego magnesu. 3. Sprawdzić czy artykulator jest odpowiednio ułożony względem silikonowej maski – nie powinien wystawać i dać się lekko otwierać za pomocą dźwigni umieszczonej z tyłu artykulatora. 4. Sprawdzić czy pokrywa czaszki z tworzywa przylega mocno do podstawy (w środku wbudowany jest magnes ,który łączy pokrywę z podstawą). 5. Ustawić żądana pozycję głowy względem operatora, za pomocą dołączonej dźwigni (czarna, lub szara rączka) zwolnić uchwyt, poprawić pozycję a następnie ponownie zaciśnąć uchwyt. 6. Podłączyć (o ile to konieczne) system odsysania (ślinociąg) do zaworu odsysającego z tyłu głowy.
<p>Właściwości ogólne:</p>	<p>Manekin stomatologiczny, jest podstawowym fantomem przeznaczonym do pracy, dostarczany z całym osprzętem symulującym pracę z dorosłym pacjentem.</p> <p>Manekin jest przeznaczony do pracy w gabinecie stomatologicznym, salach szkoleniowych, centrach akademickich.</p> <p>Manekin wyposażony jest w artykulator, imitujący naturalne ruchy żuchwy, do którego można zamocować różne typy szczęk, za pomocą prostego i wygodnego bezśrubowego montażu. Szczęki mogą być wymieniane w dowolnym momencie pracy.</p>

	Manekin można zainstalować na dowolnym fotelu dentystycznym (o ile umożliwi on, przełożenie opasek w celu zabezpieczenia go przed swobodnym przesuwaniem się).
Przeznaczenie:	Skaling, nauka pozycjonowania pacjenta, stomatologia zachowawcza, endodoncja protetyka, ortodoncja.