

Instrukcja użytkowania

Nazwa: Jednorazowe maski seria: Vivid, Style, I Love Smile

Typ: IIR - chirurgiczna

Skład: włóknina 80%, włóknina typu "meltblown" 15%, nylon i inne 5%

Zastosowanie: Do ochrony użytkownika w ogólnym środowisku medycznym.

Specyfikacja: Niesterylne, pętle na uszy, wymiary 17.5*9.5cm

Standard wykonawczy: EN 14683:2019+AC:2019


Normy spełnione w standardzie:

BFE ASTM F2101, EN14683 - =>98%

Synthetic Blood ASTM F1862, ISO22609 - =>16.0kPa (>120mmHg)

Differential Pressure EN 14683 - <60Pa/cm²

Instrukcja użycia: Aby uzyskać najlepszą skuteczność ochrony, należy nosić zgodnie z poniższym schematem.

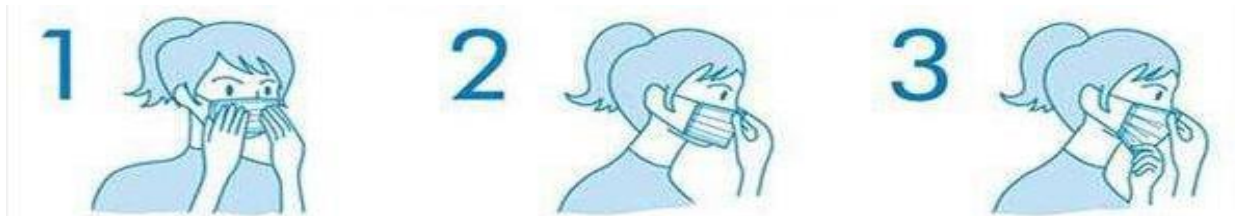

1 Zakryj nos i usta, a następnie zawieś pętlę po obu stronach uszu. Noś kolorową stroną na zewnątrz.

2 Nosek maski należy dopasować tak, aby nie dostawało się zanieczyszczone powietrze z zewnątrz.

3 Maskę należy naciągnąć aż na podbródek w sposób zademonstrowany na obrazku.

Środki ostrożności

- Nie należy używać masek, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Maska jednorazowa – zutylizuj po użyciu.
- Data produkcji lub numer partii znajduje się na opakowaniu.
- Produkt powinien być przechowywany w środowisku, w którym wilgotność względna nie przekracza 80%, bez gazów korozyjnych, chłodnym, suchym, wentylowanym, czystym.

Termin ważności: Trzy lata od daty produkcji w suchym i ciemnym otoczeniu w temperaturze pokojowej.

Dystrybutor: NEVADENT Sp. z o. o.

Adres: Rewolucji 1905r 52, 90-213 Łódź